

## Informazioni per l'uso

**Azione del prodotto:** Da un lato, l'acqua introdotta attraverso il clistere ammorbidisce e diluisce le feci e, dall'altro, stimola la dilatazione dell'intestino crasso. Se viene introdotto una quantità sufficiente d'acqua, si generano movimenti riflessi dell'intestino e da ultimo questo viene evacuato.

**Possibili applicazioni:** Per una rapida evacuazione dell'intestino crasso in caso di stitichezza, per stimolare la peristalsi intestinale, per la defecazione controllata in caso di incontinenza fecale. In naturopatia: per la pulizia dell'intestino, ad esempio durante una cura disintossicante.

**Altre applicazioni (per specialisti):** Per una rapida evacuazione dell'intestino crasso prima di un intervento, la preparazione al parto, la rettosigmoidoscopia, l'esame pelvico e l'evacuazione controllata dell'intestino in caso di colostomia.

**Nei seguenti casi non deve essere eseguita la lavanda intestinale:** malattie pelviche e gastrointestinali (dolori addominali e vomito per causa sconosciuta), lesioni della zone anale.

**Avvertenze e precauzioni:** Utilizzare solo acqua pulita (qualità dell'acqua potabile). Applicare il lubrificante sulla punta della cannula intestinale, in modo da evitare l'irritazione meccanica del canale anale. In caso di difficoltà o dolori durante l'inserimento della cannula, interrompere il trattamento e consultare il medico.

**Utilizzo in caso di gravidanza:** Donne in gravidanza possono eseguire la lavanda intestinale per l'evacuazione delle feci fino alla 20. settimana di gravidanza. Dopo la 21. settimana si raccomanda la consultazione del ginecologo o dell'ostetrica in quanto è possibile che vengano causate contrazioni di gravidanza.

**Applicazione su bambini e adolescenti:** Consigliamo di eseguire la lavanda intestinale soltanto con il consenso del bambino / adolescente e di adattare la quantità di acqua utilizzata all'età.

### Avvertenze per l'uso:

Sciagquare la bottiglia con acqua pulita prima del primo utilizzo. Lavare accuratamente le mani prima e dopo l'irrigazione.

**Preparazione:** riempire il flacone con acqua di rubinetto pulita a temperatura corporea, avvitare il tappo, collegare la valvola di ritegno alla cannula intestinale e la prolunga al flacone (l'uso della clip è opzionale). In caso di bisogno tenere a portata di mano guanti, lubrificanti, supporto di protezione impermeabile e contenitore per rifiuti.

**Indicazioni relative al tubo intestinale:** il tubo intestinale dispone di due aperture laterali arrotondate per la fuoriuscita dell'acqua. In rari casi, le aperture vengono considerate non sufficientemente arrotondate, pertanto esaminare il tubo intestinale prima dell'uso.

**Per i pazienti che scelgono l'autoapplicazione:** sedetevi comodamente sul water o distendetevi sulla schiena in posizione rilassata e inserite delicatamente la cannula intestinale per alcuni centimetri. Capovolgete il flacone e pompate l'acqua nell'intestino crasso premendo il flacone.

### Starter Set "Basic"

REF PR101

Componenti: 1 flacone da 750 ml con valvola di ventilazione  
1 prolunga con valvola di ritegno  
3 cannule intestinali

### Starter Set "Plus"

REF PR102

Componenti: 1 flacone da 750 ml con valvola di ventilazione  
1 prolunga con valvola di ritegno  
6 cannule intestinali  
1 custodia per la conservazione

### Accessori di ricambio

REF PR103

Componenti: 1 prolunga con valvola di ritegno  
20 cannule intestinali

### Starter-Set "Basic" comfort

REF PR104

Componenti: 1 flacone da 750 ml con valvola di ventilazione  
1 prolunga con valvola di ritegno  
1 prolunga con due imbuto  
1 cannule intestinali con forma ad olive

### Starter-Set "Plus" comfort

REF PR105

Componenti: 1 flacone da 750 ml con valvola di ventilazione  
1 prolunga con valvola di ritegno  
1 prolunga con due imbuto  
1 cannule intestinali con forma ad olive  
"Plus": 1 custodia

### Accessori di ricambio comfort

REF PR106

Componenti: 1 prolunga con valvola di ritegno  
3 prolunghie con due imbuto  
3 cannule intestinali con forma ad oliva

Estraete la cannula ed evacuate l'intestino. Se necessario, ripetete il procedimento.

**Per l'applicazione sul paziente da parte di personale infermieristico:** sistemare il paziente preferibilmente sul fianco sinistro con le ginocchia piegate. Inserire delicatamente la cannula intestinale. Capovolgere il flacone e fare scorrere l'acqua nell'intestino crasso. Per interrompere l'inserimento del liquido è sufficiente usare la clip. Estrarre la cannula intestinale. Se necessario, aiutare il paziente durante l'evacuazione.

**Consigli per la pulizia e il riutilizzo:** Per motivi igienici si consiglia l'uso esclusivamente personale dello strumento. I componenti flacone con tappo a vite e valvola di ritegno con prolunga vanno lavati con sapone dopo l'utilizzo. La cannula intestinale e l'irrigatore con forma ad oliva sono destinati all'uso singolo.


**Indicazioni per la conservazione:** conservare i componenti in un luogo asciutto e al riparo dalla polvere.

**Altre informazioni su:** [www.reprop.de](http://www.reprop.de), [www.reprop.it](http://www.reprop.it)


 Practomed UG, Industriestrasse 2, 79541 Lörrach, Deutschland, [www.practomed.de](http://www.practomed.de)

In caso di dubbi consultare un esperto.

Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione a questo prodotto devono essere segnalati al produttore (Practomed) e all'autorità competente dello stato membro in cui lei risiede come utilizzatore o paziente.

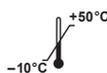


clip / pince / Schlauchklemme / klem /  
abrazadera de la manguera

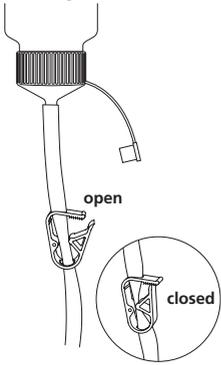


REF PR101

REF PR102

REF PR103

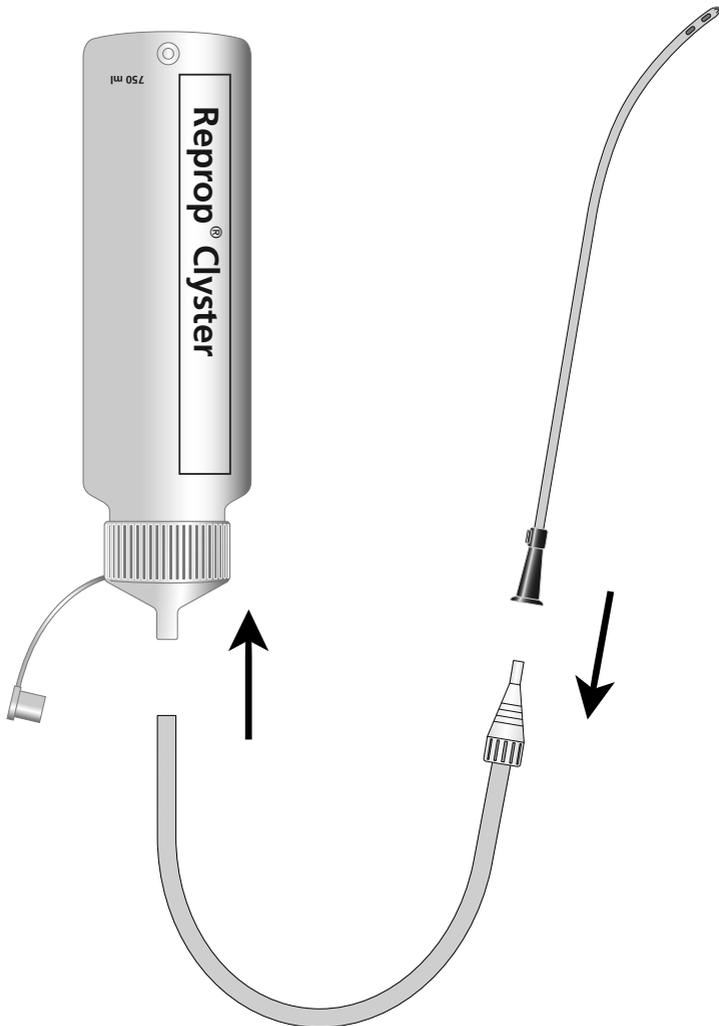

clip / pince / Schlauchklemme / klem /  
abrazadera de la manguera

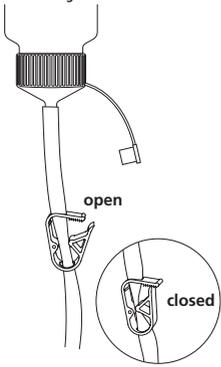

open

closed

REF PR104

REF PR105

REF PR106

