

NL - Gebruiksaanwijzing

Werkings: Door het water naar binnen te pompen ontstaat er enerzijds een verweking en verdunning van de stoelgang, en anderzijds een prikkel in de endeldarm. Als de hoeveelheid ingebrachte vloeistof groot genoeg is, ontstaan er peristaltische darmbewegingen, wat ten slotte leidt tot een leegloop van de darmen.

Toepassingen: Bij het snel verhelpen van een opstopping in de darmen, voor het opwekken van darmactiviteit bij darmproblemen, voor het gecontroleerd legen van de darmen bij incontinentie, of voor een darmspoeling tijdens het vasten.

Speciale toepassingen voor specialisten: Voor het snel legen van de darmen voor een operatie, ter voorbereiding van een geboorte, voor een rectoscopie, bij een onderzoek in de onderbuik, en bij het gecontroleerd legen van de darmen bij een colostomie.

Bij de volgende indicaties mag geen spoeling gebruikt worden: Bij acute buik- en/of onderbuikklachten (bij buikpijn en onduidelijke symptomen), bij beschadigingen van de anus.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: Gebruik alleen schoon water. Breng glijmiddel aan op de rectumkatheter om irritatie van het anale kanaal te voorkomen. Als er weerstand of pijn ontstaat tijdens het inbrengen van de katheter, moet u de handeling stoppen en een arts raadplegen.

Zwangerschap: Zwangere vrouwen kunnen tot de 20e week Klysma's gebruiken voor de ontlasting. Vanaf de 21e week raden wij aan geen Klysma's zonder overleg met een verloskundige, vrouwelijke of mannelijke arts uit te voeren, omdat onder bepaalde omstandigheden weeën geactiveerd kunnen worden.

Gebruik bij kinderen en adolescenten/jongeren: Wij bevelen het gebruik van een Klysma bij kinderen enkel met toestemming van het kind aan. Tevens dient de hoeveelheid water aangepast te worden aan de leeftijd van het kind.

AANWIJZINGEN VOOR HET INBRENGEN

Spoel de fles volledig uit met schoon water voor het eerste gebruik. Was uw handen grondig voor en na de darmspoeling.

Voorbereiding: Vul de fles met zuiver, lichaamswarme water, en draai de afsluiting vast. Verbind de terugslagklep met de darmkatheter en monteer de verlengingsbuis met de fles (Klem is optioneel). Zo nodig handschoenen, glijmiddel, waterdichte bescherming en een afvalcontainer beschikbaar stellen.

Aanwijzing rectumkatheter: De rectumkatheter heeft twee zijwaartse openingen voor het afvoeren van water. In zeldzame gevallen wordt ervaren dat de openingen niet voldoende afgerond zijn. Beoordeel de rectumkatheter voor gebruik.

Voor de patiënt bij zelfgebruik: Neem een comfortabele houding aan op het toilet of ga ontspannen op uw rug liggen en breng de katheter enkele centimeters in. Zet de fles op zijn kop en pomp het water langzaam naar binnen door regelmatig in de fles te knijpen. Trek daarna de rectumkatheter eruit en laat de vloeistof uit de darmen lopen. Herhaal de handeling indien nodig.

Voor verpleegkundigen bij gebruik op patiënten: Leg de patiënt bij voorkeur met de knieën gebogen op de linkerzijde. Breng de rectumkatheter voorzichtig in. Zet de fles op zijn

reprop® Basic

UDI-DI 110012371943

REFPR101

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindingsslang met terugslagventiel
3 stuks rectumkatheter

reprop® Plus

UDI-DI 110012373172

REFPR102

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindingsslang met terugslagventiel
6 stuks rectumkatheter
1 opbergtui

reprop® Vervanging producten

UDI-DI 110062430935

REFPR103

Onderdelen: 1 verbindingsslang met terugslagventiel
20 stuks rectumkatheter

reprop® Basic comfort

UDI-DI 111622380205

REFPR104

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindingsslang met terugslagventiel
1 verbindingsslangen met twee trechter
1 stuks rectumkatheter met olijf

reprop® Plus comfort

UDI-DI 111622381992

REFPR105

Onderdelen: 1 fles van 750ml met beluchtingventiel
1 verbindingsslang met terugslagventiel
1 verbindingsslangen met twee trechter
1 stuks rectumkatheter met olijf
1 opbergtui

reprop® Vervanging producten comfort

UDI-DI 111155061409

REFPR106

Onderdelen: 1 verlengslang met terugslagventiel
3 verbindingsslangen met twee trechter
3 rectumkatheter met olijf

kop en laat het water in de darmen stromen. Verwijder de rectumkatheter. Indien nodig, help de patiënt bij het opvangen van de vloeistof.

Aanbevelingen voor het reinigen bij hergebruik: Wij raden aan, om hygienische redenen, het apparaat uitsluitend persoonlijk te gebruiken. De onderdelen van de Reprop Clyster, zoals de fles, de afsluiter en de verbindingsslang met terugslagklep, kunnen na gebruik met water en zeep worden gereinigd. Alle rectumkatheters zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Opslagcondities: Bewaar de onderdelen droog en in een stofvrije ruimte.

Verdere informatie: www.reprop.eu




Practomed UG, Industriestr. 2, DE-79541 Lörrach
www.practomed.de



Practomed GmbH, Scheucherstr. 203, CH-8057 Zürich

Bij onduidelijkheden, raadpleeg uw leverancier.

Alle ernstige incidenten die zich in verband met dit product voordoen, moeten worden gemeld aan de fabrikant (Practomed UG) en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar u als gebruiker of patiënt bent gevestigd.

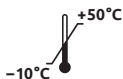

DE (1) Flasche (2) Schraubverschluss (3) Lufteinlassventil
(4) Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
(5) Darmrohr (6) Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
(7) Irrigator mit Olive


FR (1) Flacon (2) Bouchon (3) Valve d'aération (4) Tuyau de rallonge avec valve antiretour (5) Sonde Rectale (6) Tuyau avec deux entonnoirs (7) Sonde rectale avec forme d'olive

IT (1) Flacone (2) Tappo (3) Valvola di ventilazione (4) Prolunga con valvola di ritegno (5) Cannule intestinali (6) Prolungo con due imbuto (7) Cannule intestinali con forma ad olive

GB (1) Bottle (2) Screw cap (3) Air inlet valve (4) Extension tube with check valve (5) Rectal tube (6) Tube with two funnels (7) Rectal tube with olive shape

NL (1) Fles (2) Afsluiting (3) Beluchtingventiel (4) Verbindingslang met terugslagventiel (5) Rectumkatheter (6) Verbindingslangen met twee trechter (7) Rectumkatheter met olijfvorm

ES (1) Bulbo (2) Cierre (3) Válvula de entrada de aire (4) Tubo de extensión con válvula antirretorno (5) Cánula (6) Tubo de conexión con dos embudos (7) Irrigadore con forma de oliva

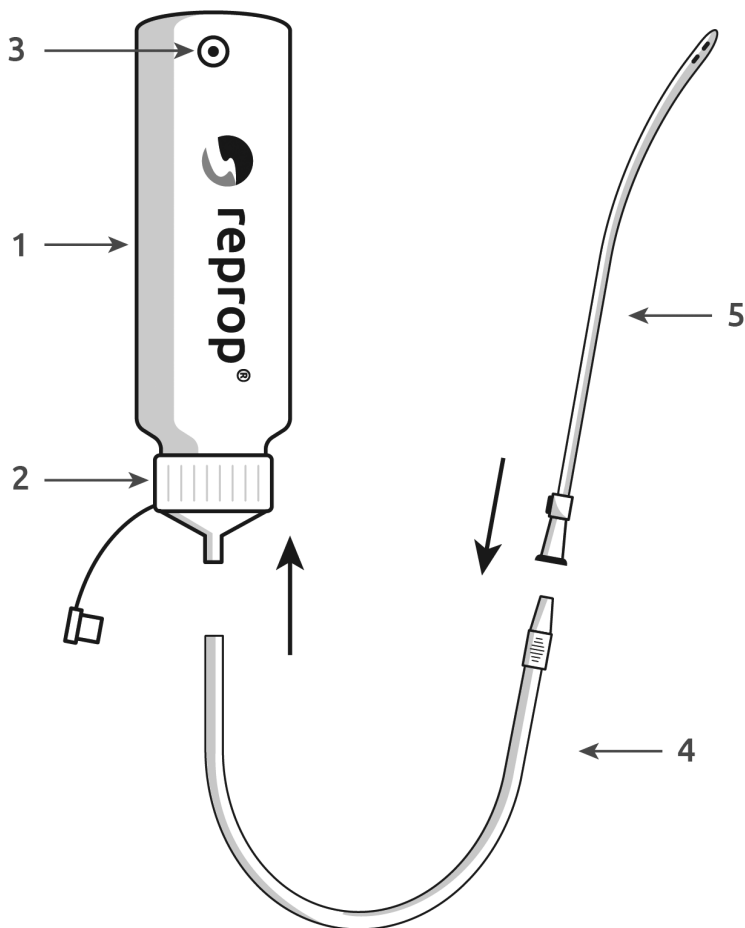

clip / pince / Schlauchklemme / klem
/ abrazadera de la manguera

