

DE - Gebrauchsinformation

Wirkungsmechanismus: Das mittels Klistier eingeführte Wasser bewirkt einerseits eine Erweichung und Verdünnung des Stuhls und andererseits einen Dehnungsreiz im Enddarm. Ist die eingeführte Wassermenge ausreichend, kommt es zu reflektorischen Darmbewegungen und schließlich zur Darmentleerung.

Anwendungsmöglichkeiten: Zur raschen Entleerung des Enddarms bei Verstopfung, zur Anregung der Darmtätigkeit bei Darmträgheit, zur kontrollierten Darmentleerung bei Stuhlinkontinenz. In der Naturheilkunde: Zur Darmreinigung, z. B. beim Fasten.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten (für Fachpersonen): Zur raschen Entleerung des Enddarms vor Operationen, zur Geburtsvorbereitung, vor Rektosigmoidoskopie, vor Unterleibsuntersuchungen, zur kontrollierten Darmentleerung bei Kolostoma.

In folgenden Fällen dürfen keine Darmeinläufe durchgeführt werden: Bei akuten Bauch- und Unterleibserkrankungen (bei Bauchschmerzen und Erbrechen mit unklarer Ursache), Verletzungen im Bereich des Afteres.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen: Nur sauberes Wasser verwenden. Gleitmittel auf die Spitze des Darmrohrs auftragen, um mechanische Irritationen des Analkanal zu vermeiden. Bei Widerstand oder Schmerzen bei der Einführung des Darmrohrs den Vorgang abbrechen und einen Arzt konsultieren.

Schwangerschaft: Schwangere Frauen können bis zur 20. Schwangerschaftswoche Einläufe zur Stuhlentleerung einsetzen. Ab der 21. Schwangerschaftswoche sollten Einläufe nur nach Rücksprache mit der Hebamme oder dem Frauenarzt durchgeführt werden, da unter Umständen Wehen ausgelöst werden können.

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen: Wir empfehlen Einläufe nur mit Zustimmung des Kindes/Jugendlichen durchzuführen und die Wassermenge dem Alter entsprechend anzupassen.

HINWEISE ZUR DURCHFÜHRUNG

Spülen Sie die Flasche vor der ersten Anwendung mit sauberem Wasser. Waschen Sie sich vor und nach der Irrigation gründlich die Hände.

Vorbereitung: Flasche mit körperwarmem, sauberem Leitungswasser auffüllen, Schraubverschluss anschrauben. Rückschlagventil mit dem Darmrohr verbinden und den Verlängerungsschlauch mit der Flasche zusammenstecken (Schlauchklemme optional). Bei Bedarf Handschuhe, Gleitmittel, wasserfeste Schutzunterlage und Abfallbehälter in der Nähe bereithalten.

Hinweis zum Darmrohr: Das Darmrohr hat zwei seitlich gerundete Öffnungen für den Wasseraustritt. In seltenen Fällen werden die Öffnungen als zu wenig abgerundet empfunden. Begutachten Sie das Darmrohr vor der Anwendung.

Für den Patienten bei Selbst-Anwendung: Setzen Sie sich bequem auf die Toilette oder legen Sie sich entspannt auf den Rücken und führen Sie dann das Darmrohr sanft einige Zentimeter ein. Stellen Sie die Flasche auf den Kopf und pumpen Sie das Wasser durch manuelles Zusammendrücken der Flasche in den Enddarm. Ziehen Sie danach das Darmrohr heraus und entleeren Sie den Darm. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig.

repropro® Basic

UDI-DI 110012371943

REFPR101

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufteinlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
3 Darmrohre

repropro® Plus

UDI-DI 110012373172

REFPR102

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufteinlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
6 Darmrohre
1 Aufbewahrungstasche

repropro® Ersatz-Zubehör

UDI-DI 110062430935

REFPR103

Bestandteile: 1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
20 Darmrohre

repropro® Basic Komfort

UDI-DI 111622380205

REFPR104

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufteinlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
1 Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
1 Irrigator mit Olive

repropro® Plus Komfort

UDI-DI 111622381992

REFPR105

Bestandteile: 1 Flasche 750ml mit Lufteinlassventil
1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
1 Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
1 Irrigator mit Olive
1 Aufbewahrungstasche

repropro® Ersatz-Zubehör Komfort

UDI-DI 111155061409

REFPR106

Bestandteile: 1 Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
3 Verbindungsschläuche mit zwei Trichtern
3 Irrigatoren mit Olive

Für Pflegepersonen zur Anwendung am Patienten: Der Patient legt sich am besten mit angezogenen Knien auf die linke Seite. Führen Sie das Darmrohr vorsichtig ein. Stellen Sie die Flasche auf den Kopf und lassen Sie das Wasser in den Enddarm fließen. Die Flüssigkeitseinführung lässt sich durch die Verwendung der Klemme unterbrechen. Bei Bedarf dem Patienten bei der Ausscheidung behilflich sein.

Empfehlungen zu Reinigung und Wiederverwendung: Wir empfehlen aus hygienischen Gründen den ausschliesslich persönlichen Gebrauch des Geräts. Die Gerätebestandteile Flasche mit Schraubverschluss und Rückschlagventil mit Verlängerungsschlauch sollen nach Gebrauch mit Seife gereinigt werden. Das Darmrohr und der Irrigator mit Olive sind für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Lagerungshinweise: Bestandteile trocken und staubgeschützt lagern.

Weitere Informationen: www.repropro.de, www.repropro.ch




Practomed UG, Industriest. 2, DE-79541 Lörrach
www.practomed.de

CH **REF** Practomed GmbH, Scheuchzerstr. 203, CH-8057 Zürich

Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle müssen dem Hersteller (Practomed UG) und der zuständigen Behörde des Mitgliedlandes, in dem Sie als Anwender bzw. Patient niedergelassen sind, gemeldet werden.

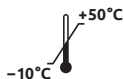

DE (1) Flasche (2) Schraubverschluss (3) Lufteinlassventil
(4) Verlängerungsschlauch mit Rückschlagventil
(5) Darmrohr (6) Verbindungsschlauch mit zwei Trichtern
(7) Irrigator mit Olive


FR (1) Flacon (2) Bouchon (3) Valve d'aération (4) Tuyau de rallonge avec valve antiretour (5) Sonde Rectale (6) Tuyau avec deux entonnoirs (7) Sonde rectale avec forme d'olive

IT (1) Flacone (2) Tappo (3) Valvola di ventilazione (4) Prolunga con valvola di ritegno (5) Cannule intestinali (6) Prolungo con due imbuto (7) Cannule intestinali con forma ad olive

GB (1) Bottle (2) Screw cap (3) Air inlet valve (4) Extension tube with check valve (5) Rectal tube (6) Tube with two funnels (7) Rectal tube with olive shape

NL (1) Fles (2) Afsluiting (3) Beluchtingventiel (4) Verbindingslang met terugslagventiel (5) Rectumkatheter (6) Verbindingslangen met twee trechter (7) Rectumkatheter met olijfvorm

ES (1) Bulbo (2) Cierre (3) Válvula de entrada de aire (4) Tubo de extensión con válvula antirretorno (5) Cánula (6) Tubo de conexión con dos embudos (7) Irrigadore con forma de oliva


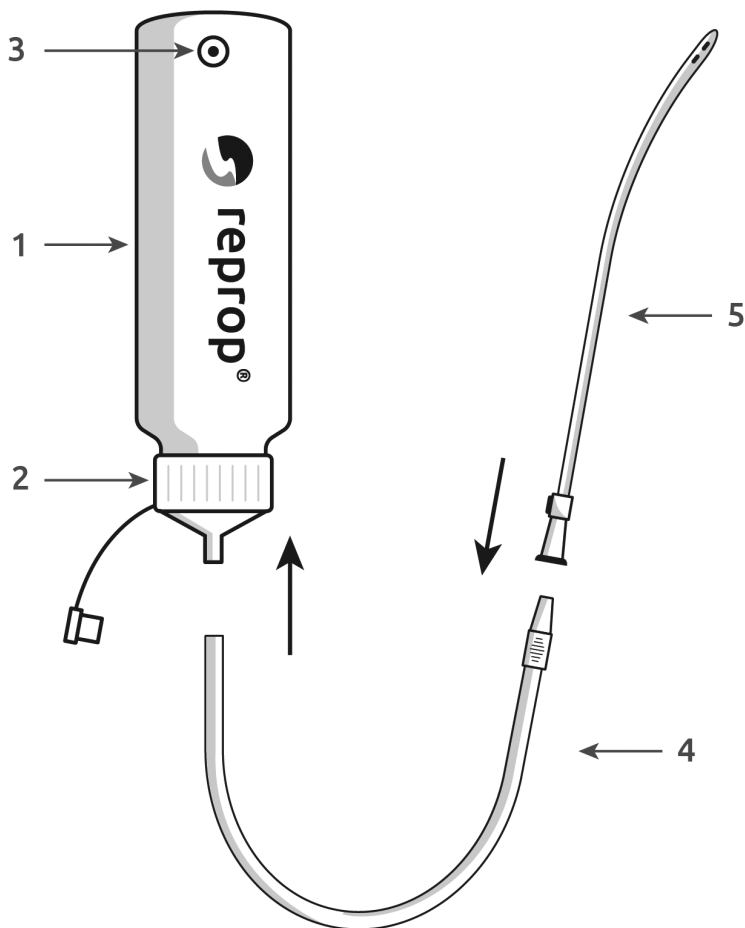


REF PR101

REF PR102

REF PR103

clip / pince / Schlauchklemme / klem
/ abrazadera de la manguera

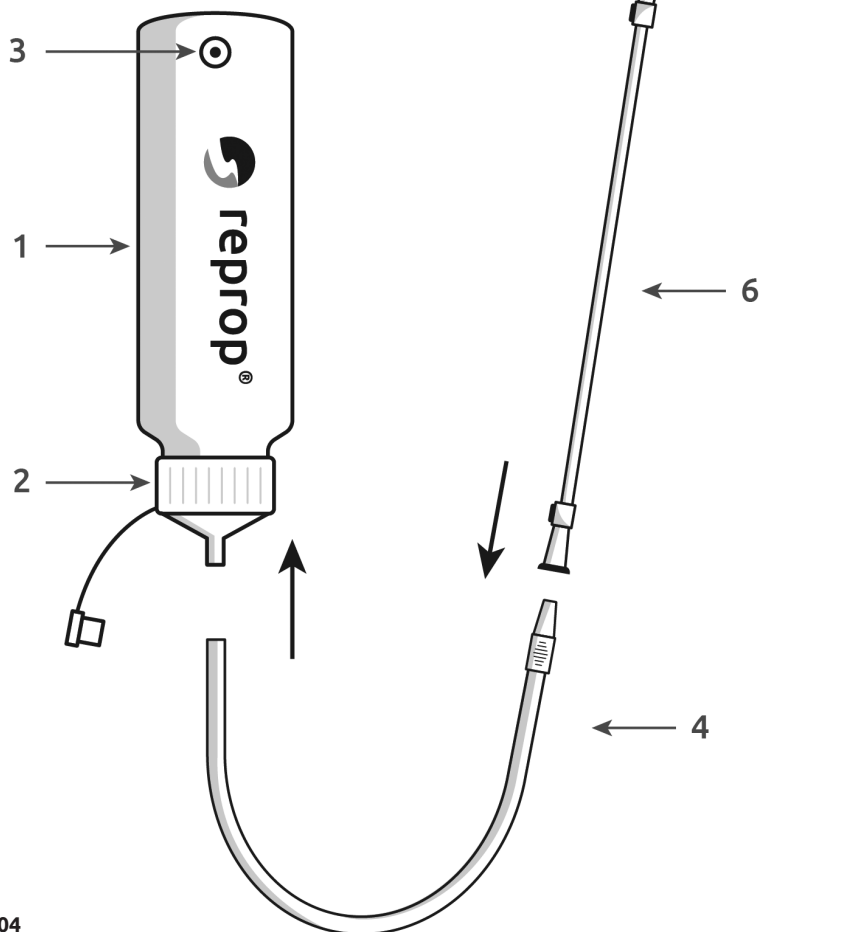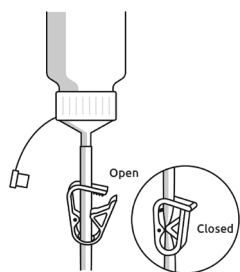

REF PR104

REF PR105

REF PR106